



ENERGIAPURA

CONFSPORT S.r.l. Via Jolanda, 59 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)



EN 14683



“ISTRUZIONI PER L’USO”

“Leggere e seguire le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante”

MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO – Modello EP-PA-2020

Tipo II secondo EN 14683

COME INDOSSARE IL DISPOSITIVO:

Prima dell’uso, verificare lo stato del dispositivo, NON utilizzare la mascherina nel caso in cui presenti danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc.) o che presenti sporcizia in corrispondenza del lato per la respirazione.



*5 per verificare che il dispositivo sia stato indossato correttamente, coprire la mascherina con le mani e respirare. Se l’aria scorre intorno alle narici, sistemare nuovamente il clip nasale. Se si notano fughe lungo i bordi della mascherina, sistemare nuovamente il dispositivo sul volto. Ripetere l’operazione sino ad ottenere un risultato ottimale.

Se non riesce ad indossare correttamente la mascherina, evitare la zona contaminata.

PRECAUZIONI D’UTILIZZO:

1. Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per l’uso e le limitazioni relative all’utilizzo della mascherina e/o non si usa la stessa durante l’intero periodo di esposizione, l’efficacia della mascherina risulterà inferiore e potrà portare a contaminazione o morte.
2. Prima dell’uso, l’utilizzatore deve informarsi sull’uso corretto della mascherina in conformità con le indicazioni di sicurezza e di salute applicabili.
3. La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti sterili e asettici, quali sale operatorie, ambulatori, e qualsiasi ambiente dove deve essere garantita la sterilità in quanto DISPOSITIVO NON STERILE di TIPO II secondo la norma EN 14683: 2019.
4. La mascherina non deve essere utilizzata se la percentuale di ossigeno nell’atmosfera è inferiore al 17%, è possibile utilizzare la mascherina esclusivamente in aree ben ventilate che contengono abbastanza ossigeno.
5. Se la mascherina risulta danneggiata o se si fatica a respirare, abbandonare immediatamente la zona contaminata, rimuovere e sostituire la mascherina. Abbandonare immediatamente la zona contaminata se si avvertono vertigini o altri fastidi.
6. Non alterare né modificare la mascherina.
7. Non utilizzare la mascherina con barba o altri peli facciali che impediscano il contatto diretto del viso con il bordo del dispositivo.
8. La mascherina va usata solo quando si conoscono le concentrazioni di sostanze nocive. In caso di sostanze sconosciute o condizioni variabili, si deve usare un dispositivo di respirazione.



Non adatto ai bambini di età inferiore ai 4 anni
Da usare esclusivamente sotto la supervisione di un adulto

VITA UTILE:

l’eccessiva resistenza alla respirazione indica l’ostruzione della mascherina alle particelle di polvere, la mascherina è un dispositivo individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno, in seguito la mascherina dovrà essere lavata a 60 °C come prescritto dal fabbricante.

ISTRUZIONI PER L’IMMAGAZZINAMENTO E LA CONSERVAZIONE:

Fino al momento dell’utilizzo, la mascherina va conservata nel suo imballaggio originale, sigillato per conservarne le sue proprietà. Durante la conservazione, il trasporto e l’immagazzinamento, devono essere rispettate le condizioni ambientali previste dal fabbricante per la corretta conservazione del dispositivo



Lavare prima dell’utilizzo a 60°
Non lavare a secco. Non stirare.
È consentito vaporizzare per sanificare.